

Veinlite®

Ett enkelt hjälpmedel vid venös blodprovstagning och vid PVK inläggning.



Veinlite LEDX®



Veinlite LEDX+®



Veinlite EMSPRO®



Veinlite PED12®



Veinlite NEO®

Produktbeskrivning

- Veinlite® gör det enkelt att belysa och lokalisera den optimala venen för snabb iv-åtkomst, inte minst till gagn för patienten.
- Veinlite® fungerar genom att belysa ett hudområde med LED-ljus (en teknik som kallas transilluminerings) så att de underliggande blodkärlen blir tydliga och klara utan skuggor.
- Veinlite®-modellerna hjälper er inte bara att lokalisera venerna, enheterna kan också stänga dem genom att försiktigt trycka enheten på huden, sträcka huden och på så vis förhindra att venen rullar, för att underlätta iv-åtkomst.
- Kombinationen av starkt orange ljus (för stark belysning) och mörkt rött ljus (för att lättare se på mörkt pigmenterade hudtoner) ger den bästa kontrasten och därmed en mycket klar bild av venerna över hela kroppen. Veinlite® finns i flera utgåvor anpassade till olika behandlingsalternativ och patientgrupper. De är handhållna och intuitiva att använda och kräver minimal träning.

Veinlite®

Ett enkelt hjälpmedel vid venös blodprovstagning och vid PVK inläggning.
C-formad design

Den unika C-formade designen och genomlysningssmetoden (transillumineringen) skapar en jämn och tydlig bild/ven visning.



Lysdioder

Modellerna använder två noggrant utvalda typer av LED-lampor, orange och röda, så ytliga och djupa vener syns tydligt på både ljus och mörk pigmenterad hud. Dessutom kan LED-lampor med fördel användas för att lysa på barn, eftersom de använda LED-lamporna i stort sett inte genererar någon värme.

Det handlar om säker venpunktion och att hitta venen och lyckas på första försöket!

Hitta venen, på ett lätt, enkelt och säkert sätt med Veinlite® patenterad teknologi!

1. **Hitta venen**

Placera Veinlite på huden, vinkelrätt mot venen. Skanna från sida till sida. Venerna kommer synas som mörka linjer pga. Transilluminering.

2. **Identifiera venen**

När en brukbar ven har hittats, roterar du Veinlite i 90° så den hamnar parallellt med venen.

3. **Säkra venen**

Tryck Veinlite försiktigt mot huden och pressa bakåt för att säkra venen. Detta korrigerar både hud och ven.

4. **Venpunktion**

Utför venpunktionen i Veinite – öppningen.

Veinlite®

Ett enkelt hjälpmedel vid venös blodprovstagning och vid PVK inläggning.

Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Bild
vl-VLEDX	Veinlite LEDX®, för användning vid skleroterapi, uppladdningsbart batterie, 2 olika ljus, inkl. 50st skyddsöverdrag.	
vl-VLED+	Veinlite LED+® venskanner för alla åldrar, pediatrik adapter, uppladdningsbart batteri, 2 olika ljus, inkl. 50 st skyddsöverdrag.	
vl-VEMSPRO	Veinlite EMS Pro® venskanner för vuxna och barn, pediatrik adapter, 2 st AA-batterier, 3 ljus, inkl. 50st skyddsöverdrag.	
vl-VPEDI2	Veinlite PEDI2® venskanner för nyfödda och barn, CR2 batteri, inkl. 25st skyddsöverdrag. *Beställingsvara	
vl-VNEO	Veinlite NEO® venskanner för både artär och vener hos nyfödda, 3 olika ljus, 1st AAA-batteri, inkl. 25st skyddsöverdrag.	



Instruktionsvideo